

医療廃棄物回収用ダンボール (MCB)

医療廃棄物処理容器

医療廃棄物回収用ダンボール

※規格品以外の特注ダンボールも製作可能です。

MCB20ℓ



【商品名】 MCB20L ダンボール
 【容量】 20ℓ
 【サイズ】 290×290×350(400)mm
 【本体色】 白
 【出荷単位】 20ヶ
 用途：鋭利物対応（三重構造）
 外箱+内箱+PE袋
 仕様：箱底ワンタッチ

MCB40ℓ



【商品名】 MCB40L ダンボール
 【容量】 40ℓ
 【サイズ】 360×360×380(465)mm
 【本体色】 白
 【出荷単位】 10ヶ
 用途：鋭利物対応（三重構造）
 外箱+内箱+PE袋
 仕様：箱底ワンタッチ

MCB60ℓ



【商品名】 MCB60L ダンボール
 【容量】 60ℓ
 【サイズ】 450×300×456(535)mm
 【本体色】 茶
 【出荷単位】 別途相談
 用途：固形物専用
 仕様：箱底ワンタッチ

MCB65ℓ



【商品名】 MCB65L ダンボール
 【容量】 65ℓ
 【サイズ】 400×360×450mm
 【本体色】 茶
 【出荷単位】 別途相談
 用途：固形物専用
 仕様：箱底ワンタッチ

MCB80ℓ



【商品名】 MCB80L ダンボール
 【容量】 80ℓ
 【サイズ】 400×400×498mm
 【本体色】 茶
 【出荷単位】 別途相談
 用途：固形物専用
 仕様：箱底ワンタッチ

※【サイズ】 横幅 × 奥行き × 高さ (取っ手含)mm

医療廃棄物回収用ダンボール 取り扱い上の注意

- ・鋭利物対応ダンボールには、液状・泥状のものは入れないで下さい。
- ・固形物専用ダンボールには、液状・泥状及び鋭利物は入れないで下さい。
- ・廃棄物を手足その他で押し込んで無理に詰め込まないで下さい。
- ・廃棄物を入れ終わったらフタを確実に閉め、封シール又はガムテープ等でしっかりと貼り付けて下さい。
- ・封をしたフタは絶対に開けないで下さい。
- ・持ち運びの際は必ず手提げを利用し、容器に直接手をかけないようにして下さい。
- ・容器を投げたり、落としたり、横にしたりしないで下さい。
- ・容器の上に乗ったり、腰掛けたりしないで下さい。
- ・容器は三段を越えて積み重ねないで下さい。
- ・容器の再使用は絶対にしないで下さい。
- ・直射日光、高温及び雨ぬれは避け、屋内保管して下さい。

※同容器は安全性を考慮しておりますが、万一に備え上記事項は必ず遵守して下さい。